

	Žádanka o vyšetření krve testem COVI-FERON		Druh primárního materiálu: <input type="checkbox"/> krev	Lab. číslo, datum:
	Oddělení klinické imunologie – laboratoř klinické imunologie Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4 Nové Město, 128 00 Praha 2 ☎ 234 075 322, 341 putova@revma.cz			
Pacient (příjmení, jméno, titul):		Adresa:		Identifikace lékaře (Razítko, IČZ a odbornost, adresa, telefonní číslo, jméno, podpis)
Číslo pojištění:				
Pojišťovna:	Diagnóza:	Pohlaví:		
Datum a čas odběru, identifikace odebírající sestry:				

Důvod provedení testu:				
Onemocnění COVID v osobní anamnéze: <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE Pokud ano, od kdy: Datum: Její trvání a průběh:				
<input type="checkbox"/> Laboratorní průkaz:				
<input type="checkbox"/> antigenním testem				
<input type="checkbox"/> PCR				
<input type="checkbox"/> náhodně zjištěná pozitivita protilátek				
Imunodeficiencie, terapie léky s imunodef. účinkem: Přípravek:oddo				
Vakcinace: <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE Pokud ano, kdy:				
	1. dávka	Datum:	Typ vakcíny:	
	2. dávka	Datum:	Typ vakcíny:	
	3. dávka	Datum:	Typ vakcíny:	
	4. dávka	Datum:	Typ vakcíny:	
Terapie:				
Biologická léčba	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	jaká:	dávka:	kdy poslední:
DMARDs	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	jaké:	dávka:	kdy poslední
Kortikoidy	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	jaké:	dávka:	kdy poslední
Další informace důležité pro hodnocení výsledku testu:				
Datum: Podpis lékaře:				

ODBĚR VZORKU A MANIPULACE S NÍM

Souprava COVI-FERON používá následující zkumavky pro odběr vzorku:

1. Nulová kontrola (šedý uzávěr)
2. Originál SP antigen (světle modrý uzávěr)
3. Variantní SP antigen (oranžový uzávěr)
4. NP antigen (černý uzávěr)
5. Mitogenová kontrola (fialový uzávěr)

Antigeny byly vysušeny (lyofilizovány) na vnitřní stěně zkumavek pro odběr krve, proto je nezbytné obsah zkumavek důkladně promíchat s krví. Zkumavky je nutné vložit co nejdříve do inkubátoru s teplotou 37°C, nejpozději do 16 hodin od odběru krve.

Pro dosažení optimálních výsledků je nutné dodržet následující kroky:

U každého vyšetřovaného pacienta odeberte 1 ml krve venepunkcí přímo do jednotlivých zkumavek pro odběr krve soupravy COVI-FERON.

Důležitá poznámka: Zkumavky by v době plnění krví měly mít teplotu od 17 °C do 25 °C.

Pokud se vyskytne při odběru malý tok krve, můžete krev natáhnout stříkačkou a 1 ml krve vždy dodat ručně do každé z 5 zkumavek. Z bezpečnostních důvodů k tomu nejlépe odstraňte jehlu stříkačky – dodržujte při tom odpovídající bezpečnostní postupy, odstraňte kryty 5 zkumavek COVI-FERON a doplňte 1 ml krve do každé (po černou rysku na straně štítku zkumavky). Zkumavky zase pečlivě uzavřete a promíchejte jak popsáno níže.

• Vzhledem k tomu, že do zkumavek se 1 ml krve natahuje poměrně pomalu, ponechte zkumavku na jehle další 2-3 sekundy poté, co je zkumavka naplněná, tak, abyste zajistili natažení správného objemu.

Černá značka na straně zkumavky označuje plnicí objem 1 ml. Zkumavky pro odběr krve soupravy COVI-FERON jsou validovány pro objemy v rozpětí od 0,8 do 1,2 ml. Pokud není krev ve kterékoli ze zkumavek v blízkosti uvedené značky, doporučuje se odebrat krev do nové zkumavky.

• Pokud při odběru krve používáte „jehlu s křídélkem“ předplňte hadičku tak, aby byla vyplněna krví ještě před nasazením zkumavek soupravy COVI-FERON.

2. Promíchejte zkumavky důkladným protřepáním po dobu 5 sekund (nebo 10krát) tak, aby se krev rozprostřela po celém vnitřním povrchu zkumavky.

- Důkladné promíchání je zapotřebí k úplné integraci obsahu zkumavky do krve.
- Během procesu protřepání předpokládáme zpěnění krve, které neovlivňuje výsledky testu a není třeba se jím zabývat.

3. Označte zkumavky správně.

4. Zkumavky je nutné uložit do inkubátoru o teplotě 37°C co nejdříve, nejpozději do 16 hodin od odběru.

Vzorky krve nechladíte ani nezmrazujete!

Vzhledem k nutné 24 hodinové inkubaci vzorky nepřijímáme v pátek a ve dnech před dny pracovního klidu (svátky).